

 Social & Sundhed		Sundhedsberedskabet Drift under ekstraordinære omstændigheder
		Procedure ved COVID-19 Rengøring/ desinficering af Visir til flergangsbrug, som smitteforebyggelse
		Fælles procedure for Social & Sundhed
Godkendelse	29.04.20	Charlotte Enig Sørensen Sundhedsfaglig konsulent/hygijnekoordinator
Anvendelses-område		Ældre & Handicap, Sundhed og psykiatri
Udarbejdelse	29.04.20	Charlotte Enig Sørensen, Sundhedsfaglig konsulent/Hygijnekoordinator
Version	1.0 (a 29.april 2020)	

Proceduren er inddelt i følgende afsnit:

1. Formål, side 1
2. Arbejdsgang, side 1
3. Referencer, side 1

1. Formål

Formålet med denne procedure er, at anvise retningslinjer for, hvordan rengøring/desinficering af Visir til flergangsbrug, som anvendes smitteforebyggende, bør ske i forbindelse med udbrud af COVID-19.

2. Arbejdsgang

Hvor der anvendes visir/beskyttelses briller som et forbyggende tiltag for at mindske spredning af smitte, skal visir/beskyttelsesbrillen som udgangspunkt, udleveres som et personligt værnemiddel til den enkelte medarbejder.

Det aftales med egen leder, hvorvidt der skal anvendes forebyggende visir/beskyttelsesbrille.

Rengøring og desinficering af beskyttelsesbriller og/ eller visir

Visir/beskyttelsesbriller rengøres mellem hver brug, efter følgende princip i prioriteret rækkefølge;

- Almindelig rengøring (vand og sæbe), hvis visiret/brillen kan tåle det, ellers anvendes
- Desinficeringsklude/Swaps.

Rengøring foretages efter ovenstående princip hver gang medarbejderne afslutter en opgave hos en borger.

Holdbarhed - udskiftning

Visiret skal være helt, uden revner, huller eller ridser. Hvor der er tvivl om skærmen er perforeret eller visiret af andre årsager er ødelagt af fx gentagne afsprøjtninger kasseres visiret som almindeligt dagrenovation og et nyt visir anvendes.